




Sekusept® PLUS

Απολυμαντικό και καθαριστικό εργαλείων

Αποτελεσματικό – Αξιόπιστο

Η πατενταρισμένη δραστική ουσία Γλυκοπρωταμίνη® καθιστά το Sekusept Plus ιδιαίτερα ισχυρό. Η άριστη καθαριστική δράση συνδυάζεται με ένα ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα που συμπεριλαμβάνει το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, παρέχοντας έτσι εξαιρετική ασφάλεια για το προσωπικό αλλά και για τα εργαλεία σας, συμπεριλαμβανομένων των εύκαμπτων ενδοσκοπίων.

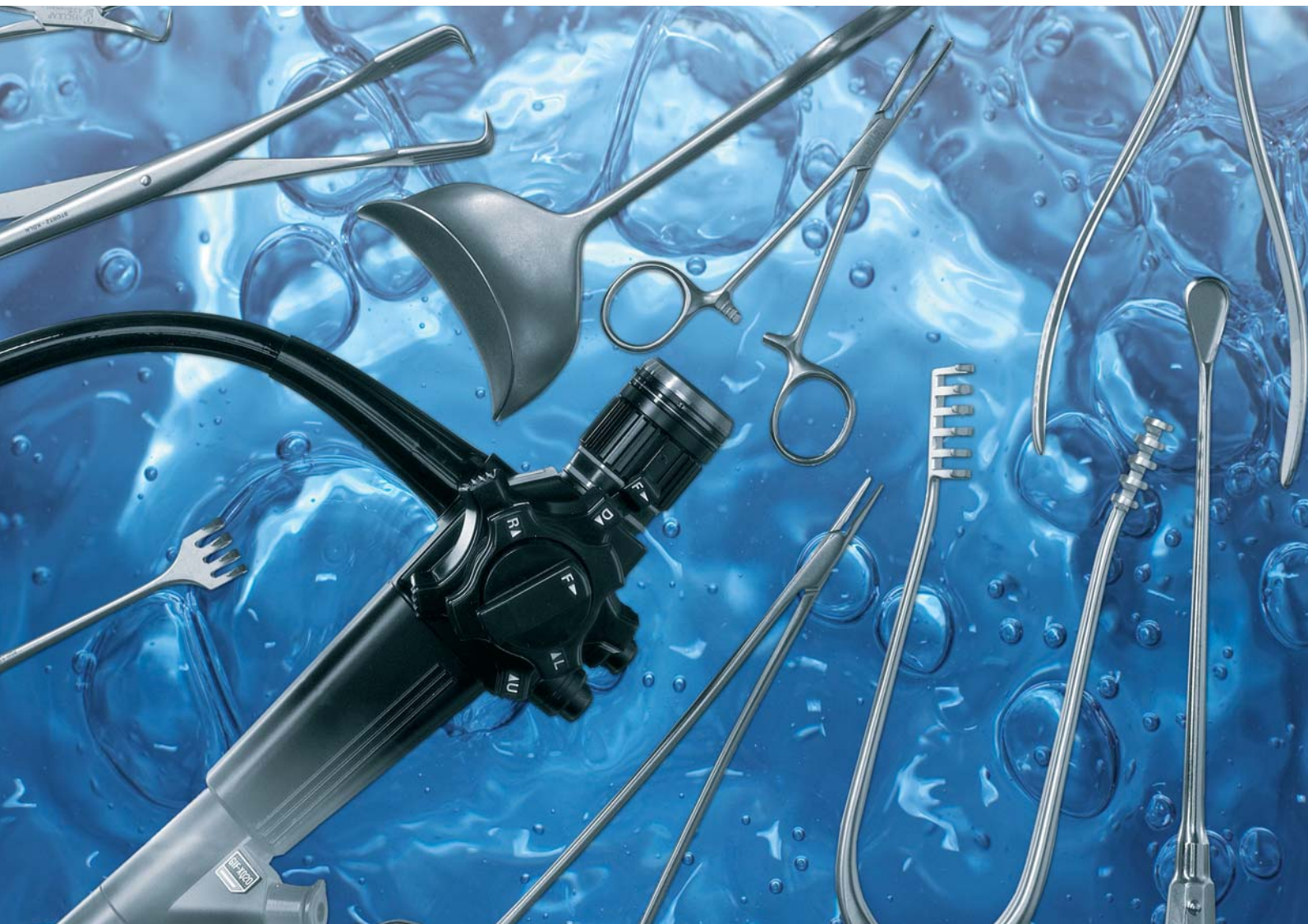

Sekusept® PLUS

Απολυμαντικό και καθαριστικό εργαλείων

Τι σας Παρέχουμε	Το Όφελος σας
Καταχωρημένο στο VAH και στο RKI, δραστικό κατά βακτηριδίων (συμπ. TB). Ιοκτόνο κατά ιών με κάψα σύμφωνα με την οδηγία 1/2004 του RKI	Προστασία για το χρήστη
Άριστη συμβατότητα με τα υλικά. Εγκεκριμένο από την Olympos.	Ιδανικό για θερμοευαίσθητα εργαλεία όπως εύκαμπτα ενδοσκόπια και αναισθησιολογικό εξοπλισμό.
Μοναδικός συνδυασμός απορρυπαντικών συστατικών με την πατενταρισμένη ουσία Γλυκοπρωταμίνη®	Εξαιρετική καθαριστική δράση, ακόμη και σε ιδιαίτερα βεβαρημένα από ρύπους εργαλεία.
Διάλυμα σταθερό ακόμη και σε θερμοκρασίες νερού 50°C	Κατάλληλο για χρήση και σε πλυντήρια υπερήχων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Τοποθετήστε τα εργαλεία και τον εξοπλισμό στο διάλυμα αμέσως μετά τη χρήση. Φροντίστε ώστε τα εργαλεία να έχουν εμβαπτιστεί πλήρως χωρίς να έχει παγιδευτεί αέρας μέσα σε αυλούς ή κοιλότητες. Ακολουθείτε πάντοτε τις προτεινόμενες συγκεντρώσεις χρήσης και χρόνους δράσης. Μετά την ολοκλήρωση της απολύμανσης, ξεβγάλετε τα εργαλεία με νερό ποιότητας τουλάχιστον πόσιμου, ή ακόμη καλύτερα με στείρο ή απιονισμένο / πλήρως αφαλατωμένο νερό. Δεν μπορούν να αποκλειστούν ενδεχόμενες αλλοιώσεις σε υλικά όπως polycarbonate, polysulphon και ακρυλικό

γυαλί μετά από μακροχρόνια χρήση. Ο κίνδυνος αυτός όμως μπορεί να ελαχιστοποιηθεί αν ξεβγάξετε σχολαστικά με νερό τα εργαλεία μετά από κάθε χρήση.

Δεν είναι κατάλληλο για εργαλεία από σιλκόνη.

CE 0297

ΣΥΝΘΕΣΗ:

100g προϊόντος περιέχουν τις ακόλουθες δραστικές ουσίες: 25g γλυκοπρωταμίνη®

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

Φιάλη των 2Lt
– Χαρτοκιβώτιο 4x2Lt με δοσιμετρική μεζούρα

Δοχείο των 6Lt

Βαρέλι των 200Lt.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες του κατασκευαστή των εργαλείων.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

	Συγκέντρωση %	Χρόνος Δράσης
Απολύμανση εργαλείων σύμφωνα με το VAH*, φυματιοκτόνο (καθαρές / βρόμικες συνθήκες)	1,5%	60 λεπτά
	2,5%	30 λεπτά
	4,0%	15 λεπτά
Απολύμανση εργαλείων σε πλυντήριο υπερήχων (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο) σύμφ. με το EN 14563 και τη μέθοδο 2001/2002 του DGHM**	3,0%	5 λεπτά
Απολύμανση εργαλείων σε περίπτωση γνωστοποιήσιμης επιδημίας σύμφωνα με το RKI*** (αντιμικροβιακό φάσμα: βακτηριοκτόνο συμπ. μυκοβακτηριδίων)	1,5%	4 ώρες
Δραστικό κατά ιών με κάψα (συμπ. HIV, HBV, HCV) σύμφωνα με την οδηγία 1/2004 του RKI	1,0%	5 λεπτά
Ιοί Adeno, Papova	1,5%	60 λεπτά

* Σύλλογος για την εφαρμοσμένη υγιεινή

** Γερμανική Εταιρεία Υγιεινής και Μικροβιολογίας

*** Ινστιτούτο Robert Koch

Ecolab Healthcare
Clean. Safe. Healthy.

Ecolab A.E.

Φλέμιγκ 15, 151 23 Μαρούσι - Αθήνα
Τηλ: 210 68 73 700 - Fax: 210 6813 527
www.ecolab.com



ECOLAB®